



De volgende rolstoelen niet transporteren:

- a) rolstoelen met afneembare handgrepen;
- b) rolstoelen die niet veilig vastgezet kunnen worden (de rugzijde en de handgrepen moeten uit 1 deel bestaan);
- c) elektrische rolstoelen.

Wij adviseren om onze RT-rolstoel te gebruiken bij deze transporter.

Maximaal belastbaar gewicht rolstoeltransporter (inclusief rolstoel):

- type SA-S: 150 kg
- type SA-2: 130 kg



De Rolstoeltransporter kan uitsluitend op rechte trappen gebruikt worden.

Bij trappen met vloerbekleding, dient de vloerbekleding slipvast aangebracht te zijn (bv. gelijmd).

BEDIENINGSINSTRUCTIE

1. Controleer de steilheid van de trap met behulp van de bijgeleverde hellingsmeter - deze bevindt zich naast de rupsbanden. Leg hiervoor de hellingsmeter over twee treden van de trap. Indien het pijltje van de hellingsmeter ver in het rode vlak terecht komt, kan de Rolstoeltransporter niet gebruikt worden; de trap is dan te steil. (De steilte van de trap mag maximaal 35° graden zijn.)
2. Rij nu de rolstoel met de rugleuning naar achteren over het rupsbandgedeelte naar de adapter.
3. Ontgrendelen van de adapter: Duw met uw voet de klem aan de onderkant van de adapter naar binnen. De adapter is nu los. Duw deze nu naar voren - tot in een loodrechte positie - en houd hem vast. Stel nu de hoogte en breedte van de twee klemmen aan weerskanten van de adapter in.
4. Bevestig nu de klemmen om het frame van de rolstoel. Maak ook de veiligheidsriem vast.
5. Adapter met rolstoel naar achteren kantelen, totdat de vergrendeling klikt.
6. Transport naar boven: Rolstoeltransporter richting trap rijden. Let op: de adapter moet naar de trap toe gericht zijn. Door middel van het naar boven indrukken van de witte bedieningsknop op het display van de adapter, wordt de Rolstoeltransporter in beweging gezet. Houd deze knop ingedrukt totdat het rode **STOP-teken** op het rupsbandgedeelte de rand van de bovenste trede heeft bereikt. Kantel de Rolstoeltransporter nu weer in een horizontale positie en druk daarna weer op de witte bedieningsknop. De Rolstoeltransporter is nu in zijn geheel boven aangekomen.




7. Transport naar beneden: Rolstoeltransporter richting trap rijden. Let op: nu moet het rupsbandgedeelte naar de trap toe gericht zijn. Door middel van het naar beneden indrukken van de witte bedieningsknop op het display van de adapter, wordt de Rolstoeltransporter in beweging gezet. Zodra het **STOP-teken** de rand van de bovenste trede heeft bereikt, deze knop loslaten. Kantel de Rolstoeltransporter nu in de richting van de trap. Druk nu weer op de witte knop en rij naar beneden tot op de eerstvolgende gelijkvloerse ondergrond (begane grond, bordes).
8. Adapter nu weer op de al beschreven manier ontgrendelen (zie punt 3) en in loodrechte positie brengen. Klemmen losmaken. Nu is de rolstoel weer helemaal los.



Indien degene die de Rolstoeltransporter gebruikt, tijdens het transport over de trap welke reden dan ook dringend moet stoppen, kunt u de rode STOP-knop op het display indrukken. Alle elektronische functies van de Rolstoeltransporter worden nu uitgeschakeld en het apparaat zal onmiddellijk stoppen en staan blijven op de trap. Door middel van het opnieuw indrukken van deze rode knop, zullen alle elektronische functies weer worden ingeschakeld. Druk nu weer op de witte bedieningsknop, naar boven of naar beneden, en de Rolstoeltransporter wordt weer in beweging gezet.

Accu indicatie

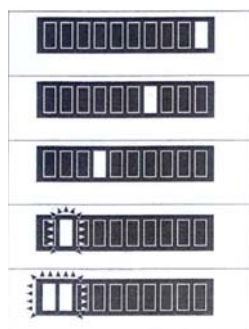

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Rechter lampje brandt: | 30 min. | (100%) |
| 2. Lampje 4 ^e van rechts brandt: | 20 min. | (65%) |
| 3. Lampje 4 ^e van links brandt: | 10 min. | (30%) |
| 4. Lampje 2 ^e van links flitst: | STOP | (0%) |
| 5. 1 ^e en 2 ^e lampjes links flitsen: accu is compleet leeg. Zorg er voor dat u al stopt bij stap 4, anders wordt de levensduur van de accu korter! | | |



Controleer **ALTIJD** de status van de accu voordat u de rolstoeltransporter gebruikt.

Zorg ervoor dat de contact-sleutel op OFF staat als de transporter niet wordt gebruikt.

Controleer **ALTIJD** de status van de accu na gebruik en laadt de transporter direct op indien nodig.

Wanneer de rolstoeltransporter langere tijd niet wordt gebruikt, dient u deze weg te zetten met een volle accu en deze maandelijks bij te laden (zelfs wanneer deze de accu indicatie 100% aangeeft).



Wanneer de rolstoeltransporter niet reageert, dient u het volgende te controleren:

1. Is de accu goed opgeladen?
2. Heeft de accu verbinding met de transporter?
3. Staat de contact-sleutel op ON?
4. Is de STOP-knop gebruikt en staat deze nog ingedrukt?